

# OKmeter Cameo Διάλυμα Ελέγχου

## Οδηγίες για τη χρήση

### ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Τα CAMEO διαλύματα ελέγχου προορίζονται για χρήση με CAMEO τανίες μετρήσης γλυκόζης του αίματος και CAMEO μετρήση γλυκόζης ως άνεις ποιοτικός ελέγχος για να εξακριβώσεται αν ο μετρητής λειτουργεί σωστά ή αν τα αποτελέσματα των δοκιμών σας είναι ακριβή.

Υπάρχουν δύο επίπεδα (High και Normal) διαλύματων ελέγχου που διατίθενται προς αγορά. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το "High Level" διάλυμα ελέγχου εάν είστε το άτομο με διαβήτη. Διαφορετικά, οσας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το "Επίπεδο Normal".

### ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα διαλύματα ελέγχου για τη δοκιμή σε ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Όταν χρησιμοποιείτε το μετρητή σας για πρώτη φορά ή μετά από την αντικατάσταση της μπαταρίας.
2. Όταν ανοίγετε μια νέα παρτίδα των τανιών μετρήσης.
3. Κάθε φορά που αφριθηγείτε το αποτέλεσμα της δοκιμής.
4. Όταν η απόδοση του CAMEO μετρητή γλυκόζης ή αντιδραστήρων είναι υποπτοί.
5. Αν πέσει ο μετρητής σας.
6. Για την εκπαίδευση ή την πρακτική χωρίς αίμα.
7. Με τη συμβολή του γιατρού σας ή επαγγελματία υγείας.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Για χρήση έξω από το σόδα (ίναντο διαγνωστική χρήση) μόνο.
2. Χρήση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο.
3. Χρησιμοποιήστε μέσα σε 30 ημέρες μετά το πρώτο άνοιγμα. Γράψτε την «Ημερομηνία Απόρριψης» για το χώρο που υπάρχει στην επικέτα της φιάλης όπου ανοίγετε για πρώτη φορά.
4. Μην προσθέστε οποιοδήποτε υγρό στο CAMEO διάλυμα ελέγχου.
5. Μην πάρετε εσωτερικά ή ενέσιμα.

### ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Τα περιεχόμενα διαλύματος ελέγχου:

1. Δ-γλυκόζης
2. Οξικό πολυβινυλού (ινστικό γαλάκτιωμα) ... 10%
3. Λυωμένο διοξείδιο του πυριτίου 0,2% ...
4. Βενζόικό Νέτριο 0,2% ...
5. Δινάτριο EDTA ... 0,1%
6. Food Pigment Red No.6 ... 0,05%
7. Αντιαρστικούς περάγονα (Πολυαιθυλενούλικηλη 4000) ... 0,02%

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

1. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δοματίου κάτω από 30°C (86°F)
2. Μην ψύχετε, παγάνετε, θερμένετε και μην εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
3. Κλείστε το πόραμα των μπουκαλιών μετά από κάθε χρήση.

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1. Εισάγετε την τανία μετρήσης για να ενεργοποιήσετε το μετρητή.
2. Ανοίξτε το καπάκι της φιάλης και κρατήστε το φιαλίδιο του διαλύματος ελέγχου με απαλή συμπίεση, μια μικρή σταγόνα διαλύματος ελέγχου εμφανίζεται στην άκρη.
3. Αγγίστε το απορροφητικό κανάλι της τανίας δοκιμής στη σταγόνα του διαλύματος ελέγχου μέχρι το απορροφητικό κανάλι να γεμίσει με το διάλυμα ελέγχου. Ο μετρητής θα έχει ένα ηχητικό σήμα που αναφέρει ότι το παρόμιθρο επιβεβαίοσες δοκιμής της δοκιμαστικής τανίας είναι πλήρης και η δοκιμή έχει αρχίσει.

4. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, το αποτέλεσμα της εξέτασης θα εμφανιστεί. Συγκρίνετε το αποτέλεσμα της δοκιμής του εύρους τιμών που αναγράφεται στο φιαλίδιο των τανιών μετρήσης.

### ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ CONTROL SOLUTION TEST;

Όταν μια μετρήση γίνεται με διαλύμα ελέγχου, θα πρέπει να πάρετε τα αποτελέσματα εντός του εύρους που αναγράφεται στην επικέτη του φιαλίδιον τανία δοκιμής. Επαναλάβετε τη δοκιμή αν το αποτέλεσμα του διαλύματος ελέγχου δεν εμπίπτει στο εύρος.

Συμβουλεύετε το εγχειρίδιο του χρήστη για περιοστήρες πληροφορίες. Αποτελέσματα που δεν εμπίπτουν στο εύρος μπορεί να προκληθούν από:

1. Σφάλμα κατά την εκτίθεση της δοκιμής.
2. Ληγμένο ή μολυσμένο διάλυμα ελέγχου.
3. Τα αντιδραστήρια δεν λειτουργούν.
4. Ο Μετρητής γλυκόζης αίματος δεν λειτουργεί.

Αν συνεχίστε να έχετε αποτελέσματα της δοκιμής του διαλύματος ελέγχου που δεν εμπίπτουν στο εύρος του ελέγχου που αναφέρεται στο φιαλίδιο των αντιδραστήρων, το CAMEO σύστημα παρακολούθησης σακχάρου αίματος περού να μην λειτουργεί σωστά.

MHN χρησιμοποιείτε το σύστημα για τον έλεγχο του αίματος σας μέχρι να πάρετε ένα αποτέλεσμα της δοκιμής που να εμπίπτει εντός του εύρους του ελέγχου στο φιαλίδιο των τανιών. Επικοινωνήστε με το διανομέα σας ή OK Biotech για βοήθεια στον αριθμό παρακάτω.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ CONTROL SOLUTION

Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές CAMEO διαλύματα ελέγχου δεν αντικατοπτρίζουν το επίπεδο σακχάρου στο αίμα.

P.T. Hadjigeorgiou co ltd

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ: P.T. Hadjigeorgiou co ltd  
P.O.Box 53158-3301 Λεμεσός, Κύπρος

Tel: 00357-25 372425 Fax: +357-25 376400

CE 0123  
OK Biotech Co., Ltd.  
4F-1, No. 83, Sec.2, Gongdao 5th Rd.,30070 Hsinchu, Taiwan

EC REP

MDSS GmbH  
Schiffgraben 41, D-30175 Hannover, Germany